

Guide d'utilisation du chargeur :

- 1) Branchez le chargeur à une alimentation électrique. Le témoin lumineux à l'arrière du chargeur s'allume en vert.



- 2) Insérez les aides auditives dans les emplacements de charge prévus.

Attention aux repères de couleur :
ROUGE = aide auditive **DROITE**
BLEU = aide auditive **GAUCHE**

Les appareils s'éteignent automatiquement lorsque vous les insérez dans le chargeur et le processus de charge commence.



Le cycle de CHARGE complet (100%) dure **trois heures**.

Charge à 80% = 90 minutes

Charge à 50% = 60 minutes

Charge à 30% = 30 minutes

Autonomie charge complète = 24h

❖ *Les indicateurs lumineux*

- Pendant la charge, les témoins lumineux présents sur les aides auditives **clignotent lentement en vert**.
- Lorsque les aides auditives sont complètement chargées, les témoins lumineux s'allument en **vert continu**.



- 3) Lorsque la **charge est finie**, retirer les aides auditives du chargeur.

- 4) Il faut allumer les appareils avant de les mettre.

Pour allumer l'aide auditive, il faut appuyer sur le bouton-poussoir pendant 3 secondes.

1 clignotement bref = aide auditive **allumée**

2 clignotements brefs = aide auditive **éteinte**



INFORMATIONS

- ✓ Le processus de charge s'arrête automatiquement lorsque les batteries sont complètement chargées. Vous pouvez donc laisser les aides auditives dans le chargeur en toute sécurité.
- ✓ L'écran de charge peut être ouvert ou fermé lors de la charge des aides auditives.
- ✓ Les aides auditives peuvent être retirées du chargeur à tout moment, pendant la charge.

Utilisation du Power Pack

Il s'agit d'une batterie externe qui fournit jusqu'à 7 jours d'autonomie au chargeur, sans alimentation par une prise électrique.

A) Raccordez le Power Pack au chargeur et verrouillez-le.



B) Branchez le câble et connectez-le à une alimentation électrique. Le power pack va se charger en même temps que les aides auditives.



C) Le témoin lumineux indique l'état de la batterie.



1 témoin = 30 %, 2 témoins = 60 %, 3 témoins = 100 %

D) A la fin du chargement, débrancher le câble. Pour vérifier l'état de la batterie, il faut appuyer sur le bouton.



Guide d'utilisation du Chargeur PHONAK



Document offert par votre audioprothésiste

Audition 44

NORT-SUR-ERDRE – 6, rue Aristide Briand – Tél. 02 40 93 65 35

Du mardi au vendredi de 9h 30 à 12h / de 14h à 18h 30

1^{er} et 3^{ème} samedi de chaque mois de 9h30 à 12h / de 14h à 18h

SAVENAY – 7, place des Halles – Tél. 02 40 80 33 49

Du mardi au jeudi de 9h 30 à 12h / de 14h à 18h 30

2^{ème} et 4^{ème} samedi de chaque mois de 9h30 à 12h / de 14h à 18h

TREILLIERES – 11, rue de Rennes - Tél. 02 51 11 31 87

Mercredi et vendredi de 9h 30 à 12h / de 14 à 18h 30

LES SORINIERES – 2 rue du G^{al} de Gaulle Tél. 02 72 02 63 97

Lundi, mardi et Jeudi de 9 h 30 à 12 h / de 14 h à 18 h 30

NORT-SUR-ERDRE

6, rue Aristide-Briand

02 40 93 65 35

SAVENAY

7, place des Halles

02 40 80 33 49

TREILLIERES

11, rue de Rennes

02 51 11 31 87

LES SORINIERES

2 rue du G^{al} de Gaulle

02 72 02 93 67

accueil@audition44.fr www.audition44.fr